



CEMEX® Interimsprothesen


OP-Technik Hüfte

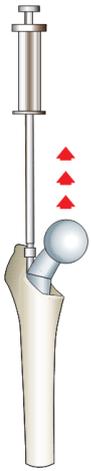

1. Entfernung der Prothese.

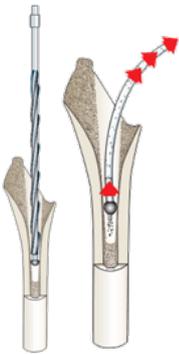


2. Umfassendes Débridement des Markraumes mit Entfernung aller Zementreste (falls vorhanden).

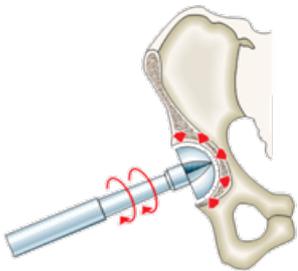

3. Umfassendes Débridement des Acetabulums mit Entfernung aller Zementreste (falls vorhanden) und Anpassung der Form



4. Auswählen der korrekten Implantatgröße mit den Probekomponenten

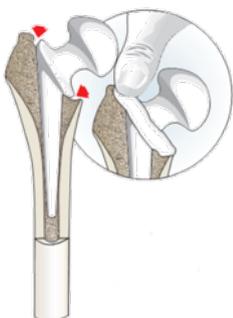

5. Einsetzen des Implantates. Bei Prothesen mit rundem Design wird eine proximale Zementierung am Kragen empfohlen



MEDIX

Medix GmbH
Rudolf-Hausner-Gasse 6 - 1220 Wien
Vertrieb: Kemating 37 - 5114 Göming
Tel.: +43 6276 21754
office@medix-medical.at