



CEMEX® Interimsprothesen

OP-Technik Knie

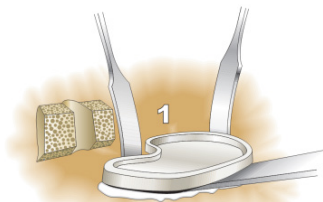


1. **Entfernung der Prothese mit umfassendem Débridement der Femurkondylen und des Tibiaplateaus und Entfernung aller Zementreste (falls vorhanden).**

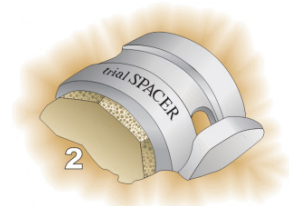


2. **Auswählen der korrekten Implantatgröße mit den Probekomponenten.**




3. **Applikation von Zement auf die Innenseite der femoralen Implantkomponente.**
Achtung: Es darf kein Zement auf die Gleitfläche gelangen.

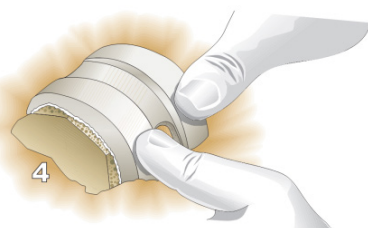


4. **Aufbringen des femoralen Implantats auf die Femurkondylen und Entfernung von überschüssigem Zement.**
Achtung: Der Zement muss ausgehärtet sein, bevor das tibiale Implantat eingesetzt wird.

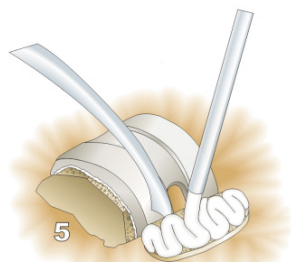

5. **Applikation von Zement auf das Tibiaplateau.**

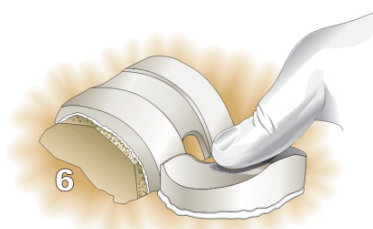

6. **Aufbringen des tibialen Implantats auf das Tibiaplateau und Entfernung von überschüssigem Zement.**

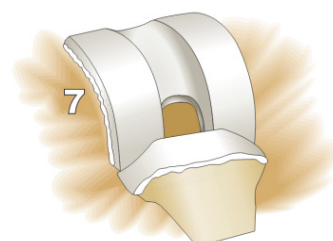

7. **Reduktion des Gelenkspalts vor der kompletten Aushärtung des tibialen Zementes.**



MEDIX

0800 00 00 00

00000000

Vertrieb: Kemating 37 - 5114 Göming

Te": Ž43 * &7* &1754

cZiWe 4 meXiI-meXiWa"at