



# CEMEX® Interimsprothesen


## OP-Technik Knie

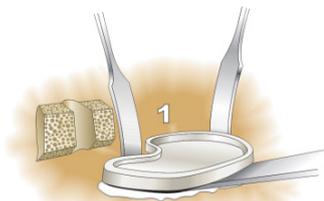


1. **Entfernung der Prothese mit umfassendem Débridement der Femurkondylen und des Tibiaplateaus und Entfernung aller Zementreste (falls vorhanden).**

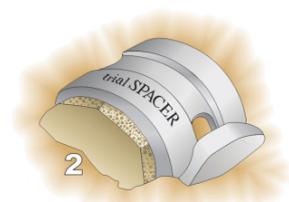


2. **Auswählen der korrekten Implantatgröße mit den Probekomponenten.**

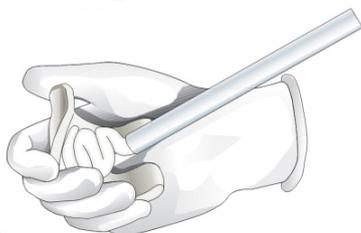


3. **Applikation von Zement auf die Innenseite der femoralen Implantkomponente.**  
**Achtung: Es darf kein Zement auf die Gleitfläche gelangen.**

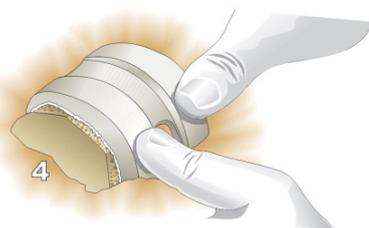


4. **Aufbringen des femoralen Implantats auf die Femurkondylen und Entfernung von überschüssigem Zement.**  
**Achtung: Der Zement muss ausgehärtet sein, bevor das tibiale Implantat eingesetzt wird.**

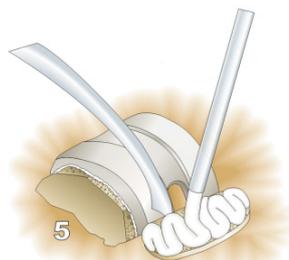

5. **Applikation von Zement auf das Tibiaplateau.**

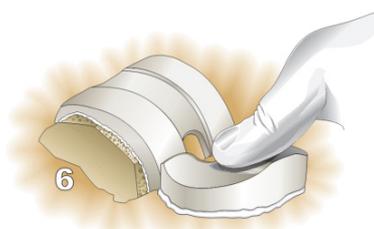

6. **Aufbringen des tibialen Implantats auf das Tibiaplateau und Entfernung von überschüssigem Zement.**

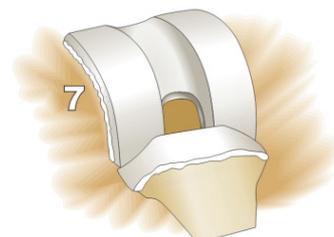

7. **Reduktion des Gelenkspalts vor der kompletten Aushärtung des tibialen Zementes.**



**MEDIX**

Medix GmbH  
Rudolf-Hausner-Gasse 6 - 1220 Wien  
Vertrieb: Kemating 37 - 5114 Göming  
Tel.: +43 6276 21754  
office@medix-medical.at